

Beachten Sie bitte, vor dem Gebrauch des Tubes und des An- bzw. Ausziehens der Kompressionsstrümpfe ein paar Handschuhe zum Schutz der Strümpfe anzuziehen.

Kompressionsstrümpfe anziehen

- 1 Den Tube über den Fuss ziehen bis über den Knöchel. Anschliessend Kompressionsstrumpf über den Tube stülpen und bis unter das Knie hochziehen.



- 2 Kompressionsstrumpf an Ferse und Fuss in die korrekte Position richten. Danach den Tube an der Schlaufe fixieren und komplett rausziehen.



Kompressionsstrümpfe ausziehen

- 1 Den Tube hoch über den Knöchel bis zum Anschlag ziehen. Anschliessend an beiden Fähnchen das Gummiband eng an das Bein festmachen.



- 2 Den oberen Rand des Kompressionsstrumpfes so weit als möglich über den Tube krepeln. Danach wird von der Fessel her der Strumpf mit Bedacht über Ferse und Fuss umgestülpt.

